



neodisher® IP Spray

prostředek pro ošetření nástrojů, ve spreji, pohonný plyn neobsahuje freony

- Hlavní oblasti použití:** K ručnímu ošetření chirurgických nástrojů.
- Charakteristika:** neodisher® IP Spray je na bázi vysoce čistého tekutého parafinového oleje a používá se k péči o chirurgické nástroje, především kloubové.
- Film přípravku neodisher® IP Spray vzniklý na povrchu prokazatelně nezneškodňuje sterilizaci v parním sterilizátoru. neodisher® IP Spray není vhodný pro nástroje sterilizované horkým vzduchem (suchým teplem).
- Použití a dávkování:** Cílené postříkání nástrojů, zejména v oblasti kloubů.
Během postříkání držte nádobku se sprejem pokud možno ve svislé poloze.
Nástavec spreje může být dle potřeby zkrácen např. v případě postříkání plných košů.
- Nesměšujte s jinými přípravky. Pouze pro profesionální použití.
- Složení:** neionogenní tenzidy
parafinový olej pro farmaceutické použití, pohonný plyn (propan/butan)
- Pokyny k uskladnění:** Skladovat při teplotách mezi 5 °C a 30 °C. Při správném skladování je doba použitelnosti 4 roky od data výroby. Doba expirace je uvedena na spreji.
- Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny:** Viz. bezpečnostní list přípravku.
- Bezpečnostní opatření:** Nádobka je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotou do 50°C.
Po použití neotvírejte a nevystavujte hoření.

